

ARCOR
MEDICAL



Syramed® μSP6000 Chroma

Bomba de Jeringa para anestesia con TIVA y TCI

Redefiniendo la infusión

FLEXIBILIDAD EN EL MANEJO DE TCI

ESPECIFICACIONES

- Interfaz a través de iconos.
- Gran pantalla táctil a color.
- Bomba ligera y compacta.
- Amplio rango de protocolos TCI.
- Codificación de fármacos por colores (ISO26825).
- Transmisión de datos del paciente entre bombas.
- Conectividad bidireccional (Ej. Dräger SmartPilot View a través de arcomed UniQueCONCEPT™).



PROTOCOLOS DISPONIBLES

A julio de 2022

Droga	Protocolo / Modelo TCI
PROPOFOL	Elefeld (con o sin opioide)
PROPOFOL	Schnider
PROPOFOL	Cortinez-Sépulveda (para pacientes con alto IMC < 250kg)
PROPOFOL	Marsh 1.6 (sitio efecto)
PROPOFOL	Marsh 4.0 (sitio plasma)
PROPOFOL	Paedfusor (para pacientes pediátricos > 3kg)
PROPOFOL	Kataria (para pacientes pediátricos > 3kg)
REMIFENTANILO	Minto
REMIFENTANILO	Elefeld
FENTANILO	Bergmann
ALFENTANILO	Maitre
SUFENTANILO	Gepts
MIDAZOLAM	Greenblatt
KETAMINA	Domino
DEXMEDETOMIDINA	Dyck

- Actualización de Protocolos sin costo adicional, TIVA cálculo de dosis.
- Permite crear hasta 8 perfiles por nombre de médico usuario.
- Permite crear biblioteca de fármacos en TIVA manual, hasta 800 protocolos con límites de seguridad en la ventana Terapéutica.

Syramed® μ SP6000 Chroma

Marca

Arcomed

Modelo

Syramed μ SP6000 Chroma

Características

- Pantalla a color táctil.
- Primera bomba All-in-One™*.
- Puerta de seguridad para proteger la jeringa.
- Librería de fármacos programables**.
- Posibilidad de configurar accesos directos.
- Un click le conduce a las funciones de uso más frecuentes.
- Integración con sistemas IDM/PDMS.
- (Infusión/Patient Data Management System).
- Asa de transporte integrada.
- Cable de alimentación standard.
- Apilable en la base (docking station) UniQueDoc®.
- Opción de Estación de trabajo***.

Especificaciones

Bomba de Jeringa

Tamaños de Jeringa aceptables

5ml, 10ml, 20ml, 50-60ml.

Límite de presión

Ajustable de 0-999 mbar o mmHg

Función de bolo

Manual y programable.

Batería

Recargable, hasta 10 horas de funcionamiento en batería (sujeto a la tasa de infusión).

Exactitud

+/- 2%

Peso

2.1 Kg

Rango de tasa de infusión

0.01 - 1500 ml/h

Rango de volumen de infundir

0.1ml - 999.0ml

Marcas de Jeringa aceptables

- Terumo.
- BD-Plastipack.
- Monojet.
- Nipro.
- B-Braun Perfusor.



*All-in-One El único concepto que pone a su disposición una bomba con funcionalidades para todos los servicios, con opciones de modos especiales además de TCI, PCA, PCEA, PCS, Bolos tocolíticos y lo más reciente PIEB (bolo epidural intermitente programado), gracias al estudio de Hogan: <http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/119150611>.

** Librería de Fármacos que permiten ser creados de acuerdo a las necesidades específicas de sus pacientes Anestesia y/o analgesia por escenarios, con límites de seguridad dentro de la ventana terapéutica.

*** La opción de estación de trabajo útil para salas predeterminadas, puede aparecer la sala asignada para un mayor control en el display.

CONSUMIBLES ORIGINALES

Garantía de calidad y eficacia en nuestros dispositivos para uso de las bombas de jeringa que en conjunto garantizan una entrega exacta al paciente y ahorro de medicamentos.


Kit Anestesia TIVA/TCI código ATIP328

Estéril, en un solo cuerpo,, minimiza los riesgos de infección al evitar hacer conexiones extras, las válvulas check garantizan la entrega positiva al paciente evitando el retorno del fármaco y contaminación de las líneas. Líneas largas con mínimo volumen de purga.

Descripción

Kit de Anestesia TIVA/TCI (bifurcado) de PVC libre de DEHP, 2 Extensiones de 250 cm, con llave de 3 vías cada una y 2 válvulas anti reflujo, Macho-Hembra Luer Lock AVP 1.8ml.

Ideal para estación de trabajo TCI código ATIP328

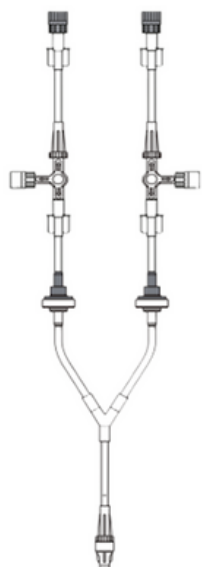

Línea de Extensión set mini volumen código ADEP154HSC

Extensión larga con mínimo volumen de purga para el ahorro de medicamentos.

Descripción

Extensión Syramed® línea de 154cm de PVC, libre de DEHP, clamp en línea macho-hembra, Luer lock VAP 1.2 ml.



Reg.No.1545E2013 SSA
Reg.No. 3189E2013 SSA
No. Aviso 223300202C7476
Publicidad dirigida a los
profesionales de la salud.



ARCOR

MEDICAL

ANA CRISTERNA
Senior Manager

81 1578.2800
ana.cristerna@arcormedical.com



María de Jesús Dosamantes #111
Col. Burócratas del Estado,
Monterrey, N.L. México C.P. 64380